




位置合わせのためのヒント

- 本体にはカメラの位置を合わせやすくするための触って分かる凸部があります



カメラの視野の側面境界

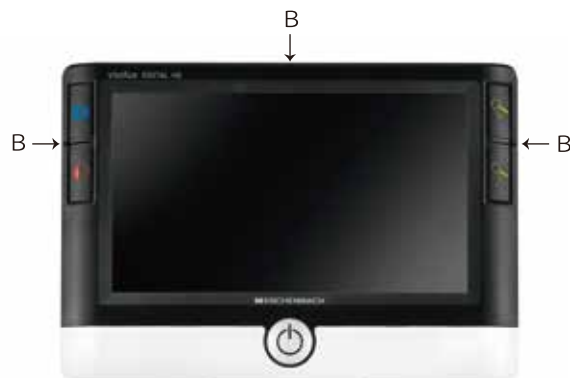

背面のカメラ位置めやす



拡大倍率の設定

- ⑫⑬ズームボタン で 2x ~ 22x まで拡大ができます。電源をオンにすると前回電源をオフにした際の設定が表示されます。



コントラスト・カラー切替



- ⑯コントラストボタン を押すと各種カラーモードが次々に切替わります。工場出荷時は白黒、白黒反転モードが設定されていますが、⑤【MENU】ボタン→③左スクロールで へ移動、⑰ ボタン（選択）でその他のフォールスカラーを追加できます。

※その他の各種設定変更については付属サービスマニュアルのP218をご覧ください



ライブ画像をファイルに保存 / S D カードから呼び出し

- ⑰保存ボタン を短押しすると現在のカメラ画像を静止画像で S D カードに保存します。ボタンを再度短押しするとライブ画像に戻ります。
- ⑰保存ボタン を 3 秒長押しすると S D カードの保存画像を確認できます。



ファームウェア更新、リセット

- ファームウェア・アップデートはご登録いただいた方へ随時お知らせいたします。ご登録ハガキのご返送をお願いします。
- 本製品がフリーズや機能しなくなった場合は本体底部の⑳RESET 開口部に伸ばしたクリップなど細い棒を差込みスイッチを押してください。本体をリセットできます。

スタートガイド

ESCHENBACH

ヴィゾルクス デジタルをご使用前にお読みください



● 主要機能

- ① 右スクロールボタン
- ② 充電表示 LED
- ③ 電源アダプター用差込み口
- ⑤【MENU】ボタン
- ⑧ 左スクロールボタン
- ⑪ カメラ
- ⑫ ㉀ ズーム倍率の拡大用ボタン
- ⑬ ㉁ ズーム倍率の縮小用ボタン
- ⑮ 電源ボタン
- ⑯ ㉂ コントラスト機能の呼び出しボタン
- ⑰ ㉃ 画像ファイルの保存及びメニューオプションの確定用ボタン
- ㉄ リセットスイッチの開口部

※すべての機能部名称は付属サービスマニュアルの表紙裏扉と P211 で確認頂けます



● 付属品

- ① 電源アダプター
- ② 外国用交換プラグ 日本国内では使いません
- ③ HDMI ケーブル テレビなどと接続しカメラ画像や画像ファイルを映し出せます
- ④ USB ケーブル
PC へ接続し SD カードのデータを操作できます
- ⑤ ストラップ 本体下部に通し穴がございます
- ⑥ クリーニングクロス



初めてご使用の前に必ず内部充電バッテリーを完全に充電してください



電源コンセントを使用する場合でも、初めてお使いになる前に内部バッテリーをフル充電する必要があります。

充電時間は 4 時間ほどかかります。

充電が完了すると差し込み口横の②充電表示 LED が赤の点滅から緑色の点灯に変わります。



電源のオン / オフは電源ボタンを 1 秒間長押しします。

画面上部にバッテリー充電状態、現在の拡大倍率、ディスプレイの明るさを示すアイコンが 2 秒間にわたって表示されます。これらの設定値は電源オフで保存されます。